

COMMENT APPAIRER

une télécommande Haelvoet sans fil



VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS

1



Tenez-vous à côté du lit avec la télécommande et l'aimant dans vos mains.

2



Processus d'appairage :
Appuyez sur le bouton "plicature-genoux bas" et tenez l'aimant contre la télécommande pendant 3 secondes. Vous entendrez un buzzer.

3




Relâchez le bouton et l'aimant et rapprochez-vous du boîtier de contrôle jusqu'à ce que la fréquence du buzzer passe de lente à rapide.

4



Confirmez l'appairage en appuyant à nouveau sur le bouton "plicature-genoux bas".

5

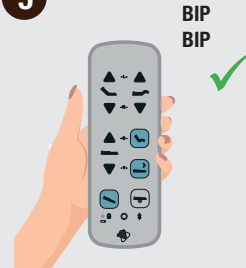

Double bip - Appairage OK

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Combien de télécommandes par lit peut-on appairer ?

Vous ne pouvez appairer qu'une seule télécommande / lit.


Combien de temps dure l'appairage entre la télécommande et le lit ?

L'appairage durera jusqu'à ce que vous appairiez une nouvelle télécommande

REGARDEZ LA VIDEO DEMO

Scannez le code QR et découvrez comment appairer une télécommande Haelvoet sans fil

<https://express.adobe.com/video/cBHPHcMvecVYO> (en anglais)

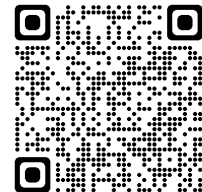

COMMENT DÉVERROILLER

le lit Aron+ Junior



- 1 Avant d'utiliser le lit, déverrouillez le lit en appuyant **2x sur les boutons DÉVERROUILLAGE.**



- 2 Lorsque la télécommande est activée, la lumière LED en bas clignotera 3x.



- 3 La télécommande peut être utilisée pendant **30 secondes** après le dernier appui sur une touche.

Scannez le code QR et apprenez à déverrouiller la télécommande sans fil et le boîtier pour personnel soignant ACC



<https://express.adobe.com/video/cBHPHcMvecVYO>
(en anglais)

TELECOMMANDE



Réglage du dossier



Réglage de la plicature-genoux



Réglage de la hauteur



Position relax



Position sommeil



Position Anti-Trendelenburg



Veilleuse (option)



Voyant LED



COMBINAISONS DE TOUCHES FRÉQUEMMENT UTILISÉES

	Verrouillage total (maintenir pendant 3 sec.)
	Déverrouillage total (maintenir pendant 3 sec.) et Déverrouillage (2x)
	Mode d'appariement (maintenir pendant 3 sec.)
	Position Trendelenburg



Gardez toujours un contact visuel avec le lit lorsque vous utilisez la télécommande sans fil. Veuillez cesser immédiatement d'utiliser la télécommande lorsque le lit ne répond pas.