

HAELVOET & LYNX



Conectarea soluțiilor de spital pentru îngrijire mai bună



01. POZIȚIA SIGURĂ DE PAT

Siguranță maximă

Poziția sigură a patului poate fi monitorizată de la distanță (tabletă / telefon). Simbolul verde al poziției sigure de pat este activat numai dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiții.

✓ Starea frânelor

Prima condiție e ca frânele să fie activate. În caz contrar, va porni semnalul sonor al alarmei de frână dacă patul este conectat la priză.

✓ Starea înălțimii patului

Pentru o siguranță sporită, patul este în cea mai joasă poziție (de dormit).

✓ Starea protecțiilor laterale

Personalul medical nu este nevoit să verifice în fiecare salon dacă protecțiile laterale sunt ridicate sau nu. Acest lucru poate fi urmărit de la distanță.



02. DETECTARE IEȘIRE DIN PAT

Starea pacientului

Un semnal de alarmă automat poate fi activat în cazul în care pacientul părăsește patul. Această funcțiune poate fi personalizată în funcție de profilul pacientului și/sau de timpul pe care acesta îl petrece în afara patului de spital.



03. APELARE ASISTENTĂ

Abilitarea pacienților

În cazul în care pacientul sau personalul medical are nevoie de ajutor, un semnal este transmis către personalul medical din apropiere printr-o singură apăsare a unui buton integrat în protecțiile laterale DuoSafe.

04. IMAGINE DE ANSAMBLU

Pe tabloul de bord, puteți vedea o imagine de ansamblu a parametrilor monitorizați: protecții laterale, detectarea ieșirii din pat, starea frânelor și starea (tehnică) a patului.



URMĂRIȚI VIDEOCLIPUL AICI
și descoperiți toate funcționalitățile:



De ce să alegeți Haelvoet Connect Solutions?

Integrarea tehnologiei la paturile de spital și de îngrijire reprezintă un plus de valoare pentru pacient, personalul medical și serviciile integrate. Alegerea Haelvoet Connect Solutions vă oferă numeroase avantaje:

ÎNGRIJIRE EFICIENTĂ

Automatizarea sarcinilor

Optimizați volumul de muncă pentru personalul medical prin automatizarea sarcinilor. Patul conectat este special conceput pentru o eficiență sporită, oferind profesioniștilor medicali mai mult timp pentru o îngrijire dedicată. Cunoașterea stării patului este garantată. Fie că este vorba de poziția patului, de ajustarea înălțimii, sau de orice alt parametru, puteți monitoriza totul în timp real cu ajutorul sistemului intuitiv conectat. Acordați prioritate îngrijirii eficiente grație tehnologiei avansate.

ASIGURAȚI SIGURANȚA




Prevenirea căderii

Monitorizarea stării paturilor medicale și a protecțiilor laterale joacă un rol esențial în prevenirea căderilor. Această inovație oferă conducerii spitalului și personalului medical informații în timp real. Patul conectat funcționează autonom pentru o siguranță operațională ridicată într-un mediu de îngrijire sau tratament. Starea patului este conectat atât la sistemul de apelare a asistentei medicale, cât și la iluminatul inteligent.

SALVAȚI TIMP CRUCIAL

Alarmă de resuscitare integrată

În situații de urgență, fiecare secundă contează. Alarma integrată de RCP (resuscitare cardio-pulmonară) este o caracteristică care salvează vieți, poziționând rapid patul în poziția optimă de RCP în câteva secunde. Această soluție conectată nu numai că declanșează o alarmă pentru echipa de urgență, dar activează și iluminarea inteligentă pentru a ghida rapid echipa către salonul corect. În acest fel, se economisește timp vital atunci când este cel mai important.

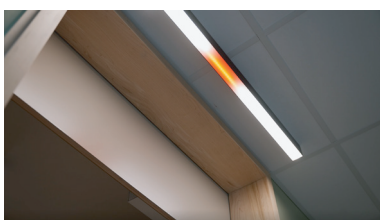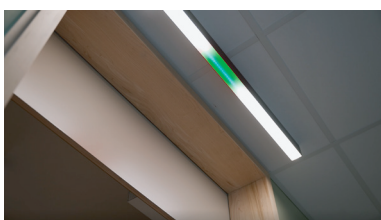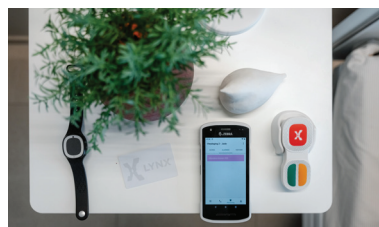

Poziția sigură a patului

Apelare asistentă

Orientare prin iluminat inteligent

DESCOPERIȚI PARTENERII NOȘTRI AICI:



www.lynxconnect.eu/en

www.haelvoet.com