

ZenSo E-move


Der ZenSo E-move Relaxesessel ist elektrisch verstellbar.

Die Batterie des ZenSo E-move Sessels ist sicher an der Unterseite des Relaxesessels eingebaut.

ZenSo mit integrierter Batterie

Die **Batterie** des **ZenSo E-move Relaxesessels** ist sicher im unter dem Relaxesessel eingebaut. Es wurde bewusst eine fest verbaute Batterie gewählt, die nicht zum Aufladen entnommen werden kann, da dies mehrere ökologische und sicherheitsrelevante Vorteile bietet:

1. Das **Ladegerät** wird über eine **magnetische Stromverbindung** angeschlossen, die Schutz vor unbeabsichtigtem **Wegrollen und Stolpern** bietet.
2. Diese Verbindung trennt den Sessel sofort vom Stromnetz, wenn er bewegt wird oder jemand über das Kabel stolpert. Die magnetische Stromverbindung befindet sich auf der linken Seite des Sessels unter den Armlehnen.

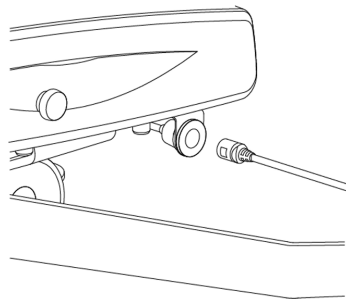

3. Da die Batterie fest verbaut ist und nicht zum Laden herausgenommen wird, besteht kein Risiko, dass sie beim Herausnehmen, Transportieren oder Wiedereinsetzen herunterfällt. Bei einem starken Stoß, wie z. B. einem Sturz, muss die Batterie aus Sicherheitsgründen ersetzt werden, damit Brandgefahr besteht.
4. Dank der fest verbauten Batterie muss diese nicht entfernt und zu einer Ladestation gebracht werden, was die Effizienz erhöht. Dadurch entfällt auch die Notwendigkeit, zwei Batterien pro Sessel vorzusehen.

Batterietypen

Sie können zwischen einer Batterie mit einer Kapazität von **1.800 mAh** oder **4.000 mAh** wählen.

- **Batterie 1.800 mAh:** Je nach Bewegungsart (Rückenlehne, Beinstütze) und Belastung liefert die Batterie etwa **40 Minuten** Strom bei einer Belastung von **3A** (ca. **65 Arbeitszyklen** des ZenSo E-move Relaxesessels). Bei normalem Gebrauch wird der Sessel wöchentlich aufgeladen.
- **Batterie 4.000 mAh:** Je nach Bewegungsart (Rückenlehne, Beinstütze) und Belastung liefert die Batterie etwa **120 Minuten** Strom bei einer Belastung von **3A** (ca. **195 Arbeitszyklen** des ZenSo E-move Relaxesessels). Bei normalem Gebrauch wird der Sessel alle 2 bis 3 Wochen aufgeladen. Bei geringerem Gebrauch wird empfohlen, den Sessel alle 2 Monate zu laden.

Garantie

Die Garantiezeit für die **Li-ion Batterien** beträgt **3 Jahre**. Bei normalem Gebrauch beträgt die Mindestlebensdauer der Batterie **7 Jahre**.

